



(umístění tlačítek S (set) a M (memory) může být zrcadlové)

Baterie:

Alkalické baterie AAA 4 ks (nejsou součástí balení) lze využít cca k 250 měření.
Doporučujeme využívat všechny baterie stejného stáří a značky.

Možnost napojení přes USB kabel bez AAA baterií.

Měření:

1. Upevněte manžetu dle vyobrazení na manžetě. Ujistěte se, že není příliš těsná. Spodní okraj manžety by měl být přibližně 2-3 centimetry nad ohybem paže.
2. Ujistěte se, že manžeta je na úrovni srdce.
3. Zmáčkněte vypínač – měření se spustí. V případě volby uživatele nejdříve stiskněte tlačítko uživatele M k výběru uživatele, a následně stiskněte vypínač (nastavení uživatele bude vysvětleno níže v tomto manuálu)
4. Po zaznění zvukového signálu je měření ukončeno. Objeví se hodnoty systolického a diastolického tlaku, tepové frekvence a označení na stupnici WHO.

V případě pocitu jakéhokoli diskomfortu v průběhu měření přístroj vypněte vypínačem.

Manuál - Tlakoměr XYJ-02-Black

Abyste mohli plně využít všech výhod tlakoměru, přečtěte si prosím pečlivě tento návod před samotným použitím přístroje.

Nastavení:

Po vložení baterií či připojení k USB kabelu nastavte čas a datum tak, aby se všechny budoucí uložená měření ukládala do paměti se správnými údaji.

1. Nastavení uživatele. Stiskněte tlačítko M pro výběr uživatele 1 nebo uživatele 2 znázorněnými ikonou panáčka.
2. Stiskněte tlačítko S – nyní nastavujete věk pomocí tlačítka M
3. Dalším stisknutím tlačítka S přepnete na nastavení aktuálního data (nejdříve měsíc – potvrdíte stiskem S a pak dny, opět potvrdíte stiskem S)
4. Dalším krokem je nastavení času pomocí tlačítek M a potvrdíte stiskem S

Umístění manžety:

Nepoužívejte přístroj k jiným účelům než k měření krevního tlaku. Jednotku také nepoužívejte ve spojení s jinými zařízeními (například s manžetou z jiného přístroje). Nesprávné použití může způsobit poruchu zařízení nebo zranění osob.

1. Umístěte manžetu na horní část levé paže (viz vyobrazení na manžetě)
2. Ujistěte se, že manžeta není aplikovaná příliš natěsno a že je umístěna cca 2-3 cm nad ohybem paže
3. Zařízení lze užit i na pravé ruce. Mějte však na paměti, že je vždy nutné měřit vždy na stejné ruce, jelikož mezi pravou a levou rukou může být rozdíl v tlaku až 10mmHg
4. Při opakovaném měření vždy počkejte 3-5 minut mezi jednotlivými měřeními

Pozice pro měření:

Pro správné měření tlaku by měla být manžeta na úrovni srdce, osoba, které je tlak by měla sedět a paži, na které se přístroj nachází, by měla mít opřenou (například položenou na stole vedle měřícího zařízení).

Upozornění: nevyužívejte v blízkosti mobilních telefonů nebo jiných zařízení, která vyzařují elektromagnetické vlny. Pokud tak učiníte, může dojít k poruše.

Měření krevního tlaku:

1. Umístěte manžetu
2. Vyberte uživatele
3. Zmáčkněte vypínač
4. Po ukončení měření opět zmáčkněte vypínač (nebo vyčkejte na automatické vypnutí přístroje).