

Enuretický alarm TYP AK-BL008, SERIA AA/CACC

Přepínač Vypnuto OFF / Zapnuto ON



Enuretický alarm AK-BL008 slouží k detekci moči a signalizuje zvukem a světlem po detekci i 1 kapky moči na čidle.

Před prvním spuštěním sejměte plastový kryt baterie, vložte baterie a umístěte kryt zpět. Následně zapněte zařízení přepínačem do polohy ON.

Zařízení používá 2 x CR2025 3V baterie.

Před připojením zařízení otestujte.

Reproduktor s diodou upevněte k rameni dítěte pomocí elastického popruhu.

Kabel musí být veden pod oblečením.

POZOR: Nepoužívejte zařízení bez oblečení nebo babelky mimo oblečení, protože hrozí nebezpečí udušení kabelem.

Čidlo musí být připevněno na vnější straně prádla tak, aby póly senzoru byly odděleny materiálem prádla.

Pokud dojde k namočení prádla, póly senzoru se propojí a spustí se alarm.

V tomto okamžiku by se dítě mělo probudit.

Kůru lze přerušit po 14 suchých nocích.

SPUŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ

Přepněte spínač do polohy ON. Otestujte zařízení upnutím sondy.

VYPNUTÍ ZAŘÍZENÍ

Přepněte spínač do polohy OFF. Před uložením přístroj očistěte.

POZNÁMKY

Pokud alarm pípne každou minutu nebo pokud přístroj nereaguje, vyměňte baterie.

Čidlo nelze připevnit přímo na tělo.

Reproduktor s LED diodou je možné připevnit pouze na rameno dítěte pomocí elastického popruhu.

Nebudete-li zařízení delší dobu používat, vyjměte baterie.

Reproduktor s diodou připevníme k ramenu pomocí elastického popruhu

Kabel je nutno vest pod oblečením

Čidlo připevňujeme z vnější strany spodního prádla



VAROVÁNÍ !

Zařízení není hračka.

Výrobek není z důvodu konstrukčního řešení vhodný pro děti do 3 let.

Alarm je určen pro jednoho uživatele.

Stejný senzor by neměl být používán u různých dětí z důvodu hygieny.

Pokud zjistíte jakékoli poškození senzoru, přijímače nebo kabelu, okamžitě přestaňte používat.

Opatření:

Zařízení by mělo být připojeno v souladu se značkami uvedenými v návodu.

Po použití by zařízení nemělo být přístupné dětem.

Údržba:

K čištění přístroje používejte vlhký hadřík. Zařízení nenavlhčete.

Zařízení nenamáčejte přímo v proudu vody.

Zařízení skladujte na suchém místě při pokojové teplotě.

Před použitím uzavřete čidlo pro zkoušku a zkontrolujte, zda zařízení správně funguje.

Po použití zařízení osušte.

Pokud po namočení a otevření čidla přístroj stále signalizuje, vypněte přístroj a vysušte čidlo např. vatovým tamponem nebo kousek savé tkaniny.

Vyrobeno v Číně.