

## Návod k použití Enuretický alarm BJ02 velikost L

### Použití

Alarm slouží ke zjištění úniku moči. Je určen zejména pro děti, seniory a osoby s inkontinencí. Po navlhnutí senzoru vyše vysílač signál do náramku, který upozorní zvukem nebo vibracemi.

### Hlavní přínosy

- Rychlé upozornění pečující osoby.
- Omezení dlouhodobého kontaktu pokožky s močí a snížení rizika opruzenin.
- Lepší kvalita spánku díky omezení častých kontrol.
- Pomoc při náviku chůze na toaletu.
- Snížení zátěže pečovateli.

### Ovládání náramku

1. Podržte horní tlačítko (vyp./zap.) asi 1,5 sekundy pro zapnutí.
2. Dalším stiskem přepínáte režimy zvuk/vibrace.
3. Dvojitým stiskem horního tlačítka aktivujete režim proti ztrátě.
4. Dolním tlačítkem ovládáte světlo (5 režimů). Dlouhým podržením světlo vypnete.
5. Při nízkém stavu baterie se zařízení automaticky vypne. Nabíjení: 5 V / 2 A. **NENABÍJET RYCHLOU NABÍJEČKOU!**



Distributor:

**3MH s.r.o., Jesenická 470/14, Šumperk 78701 IČ:24720151, DIČ: CZ24720151**



### Vysílač

- Po zapnutí se automaticky spáruje s náramkem.
- Po kontaktu s močí nebo vodou spustí alarm.
- Červená LED při nabíjení vysílače bliká, po plném nabití zhasne.
- 

### Mobilní aplikace

Můžete si stáhnout také aplikaci **iSearching** z obchodu s aplikacemi. Zapněte náramek, dvojitým stiskem horního tlačítka zapněte na zařízení režim proti ztrátě (znak obrácené kapky) a v aplikaci vyhledejte zařízení ITAG (tlačítko +) a spárujte jej. V nastavení lze pak zapnout upozornění při ztrátě spojení Bluetooth.

### Údržba

Senzor udržujte čistý a suchý. Zařízení neponořujte do vody. K čištění použijte pouze měkký suchý nebo mírně navlhčený hadřík.

Distributor:

**3MH s.r.o., Jesenická 470/14, Šumperk 78701 IČ:24720151, DIČ: CZ24720151**