

Návod k použití

Enuretický alarm BJ02 velikost S

Použití

Alarm slouží ke zjištění úniku moči. Je určen zejména pro děti, seniory a osoby s inkontinencí. Po navlhnutí senzoru vyše vysílá signál do náramku, který upozorní zvukem nebo vibracemi.

Hlavní přínosy

- Rychlé upozornění pečující osoby.
- Omezení dlouhodobého kontaktu pokožky s močí a snížení rizika opruzenin.
- Lepší kvalita spánku díky omezení častých kontrol.
- Pomoc při nácviku chůze na toaletu.
- Snížení zátěže pečovatelů.

Ovládání náramku

1. Podržte tlačítko (vyp./zap.) asi 1,5 sekundy pro zapnutí.
2. Dalším stiskem přepínáte režimy zvuk/vibrace.
3. Dvojitým rychlým stiskem tlačítka aktivujete režim proti ztrátě.
4. Při nízkém stavu baterie se zařízení automaticky vypne. Nabíjení: 5 V / 2 A. **NENABÍJET RYCHLOU NABÍJEČKOU! POZOR JE NUTNO NABÍJET KAŽDÉ RÁNO**



Distributor:

3MH s.r.o., Jesenická 470/14, Šumperk 78701 IČ:24720151, DIČ: CZ24720151

Vysílač

- Po zapnutí se automaticky spáruje s náramkem.
- Po kontaktu s močí nebo vodou spustí alarm.
- Červená LED při nabíjení vysílače bliká, po plném nabití zhasne.

Mobilní aplikace

Můžete si stáhnout také aplikaci **iSearching** z obchodu s aplikacemi. Zapněte náramek, dvojitým stiskem horního tlačítka zapněte na zařízení režim proti ztrátě (znak obrácené kapky) a v aplikaci vyhledejte zařízení ITAG (tlačítko +) a spárujte jej. V nastavení lze pak zapnout upozornění při ztrátě spojení Bluetooth.

Údržba

Senzor udržujte čistý a suchý. Zařízení neponořujte do vody. K čištění používejte pouze měkký suchý nebo mírně navlhčený hadřík.



Distributor:

3MH s.r.o., Jesenická 470/14, Šumperk 78701 IČ:24720151, DIČ: CZ24720151